

5. Jótállás, Szavatosság:

A jótállási idő az átvételtől számított 12 hónap.

6. Nyilatkozat


A Sipos Shoes Kft. által gyártott eszköz **megfelel** az MDR rendelet I. mellékletében felsorolt a biztonságosságra és teljesítőképességre vonatkozó általános követelményeknek és rendelkezik a gyártó szándéka szerinti teljesítőképességgel. Az MDR XIII. melléklet 2. pontja szerint a Sipos Shoes Kft. rendelkezik olyan dokumentációval, amely tartalmazza az eszköz tervezésének, gyártásának, teljesítőképességi jellemzőinek, elvárható teljesítőképességi jellemzőinek megértéséhez szükséges adatokat. Rendeltetészerű használat esetén nem veszélyezteti a beteg, a kezelő vagy más személy egészségét, illetve biztonságát.

Dátum:

Cégszerű aláírás

A lábbeli anyagai:

Piktogram: A lábbeliken található ábrás tájékoztató magyarázata az alábbi:

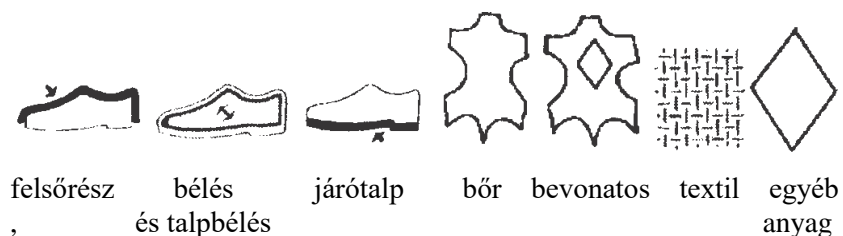

**A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT A
KIHORDÁSI IDŐ VÉGÉIG, ILLETVE A
SZAVATOSSÁGI IDŐ VÉGÉIG
MEG KELL ŐRIZNI!**

Sipos Shoes Kft.

Székhely:1042 Budapest Berda József u. 12.
Gyártóhely:4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u.41.
Tel.: 06-20/394-7500
www.siposshoes.hu

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Rendelésre készített eszköz

Ortopédiai cipő

Az eszköz

Típusa: Gyártási azonosítószám:.....

Egyedi jellemzői.....

Megnevezés:.....

Név: TAJ szám:

Lakcím:
kizárólagos használatára,

Felíró orvos:.....

..... intézmény
rendelése alapján egyedi méretvétel alapján készült.

Nyilatkozom, hogy az általam gyártott eszköz a fent nevezett beteg/felhasználó kizárólagos használatára írásos rendelvény alapján készült. Regisztrációs kötelezettségemnek az eszköz tekintetében, és mint gazdasági szereplő eleget tettem.

Felülvizsgálva 2021.07. 01.

1. Általános ismertetés, használat:

Az Ön által megrendelt, s társaságunk üzemében elkészített lábbeli a sorozatban gyártott cipőkhöz képest annyiban tér el, hogy orvosi rendelvény alapján, méretre készült, s a láb kezelésének, valamint komfortérzésének teljesebbé tétele érdekében a rendelvénynek megfelelő ortopéd cipő tartozékokat építettünk bele.

A lábbelije felsőrészének, bélésének, illetve járótalpának anyagáról a cipőbe ragasztott címke tájékoztatja Önt.

A gyógy-, illetve ortopéd cipő különböző gyógyító eljárások hasznos kiegészítője, de azokat nem helyettesítheti. A gyógycipőt sok esetben egész életen át kell viselni, ezért nagy gondot fordítunk arra, hogy megfelelő minőségű alapanyagokkal biztosítsuk a tartósságukat. Kellő gondoskodással és ápolással a cipő élettartama jelentősen meghosszabbítható, ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el kezelési tanácsainkat is!

A gyártás folyamán többször végeztünk ellenőrzést, amellyel a készülő termék minőségét kívántuk biztosítani.

A gyártás végén végellenőrzést hajtottunk végre, amelynek keretében a megrendelésének megfelelő, elkészült terméket komplexen ellenőriztük, s ezen a tájékoztatón bélyegzővel és aláírással dokumentáltunk.

2. Felvétele és használata:

Mind egészsége, mind lábbelije érdekében lehetőleg az időjárásnak megfelelő cipőt viseljen.

Megnöveli a cipő élettartamát, ha használat után gondosan kisámfázza, vagy papírral kitömi a fejrészt.

Ha lábbelije átnedvesedett, jó, ha az előbbi tanácsot követi, de ügyeljen a szárításra is.

A cipő elsősorban utcai viselet, ezért lehetőleg ne viselje egész nap. Egész napos viselet egészségügyi okok miatt sem ajánlatos – kivéve, ha az orvos így rendel – tehát ahol mód van rá, cserélje át.

A bőrtalp hajlamos az átnedvesedésre. A nedves talpú cipő huzamosabb viselése egészségtelen, ezért újbóli használat előtt győződjön meg a talp megszáradásáról. Az átnedvesedett lábbelit ne helyezze műanyag padlóra, szárítása farácson történjen.

Ha a lábbelin kisebb hiba keletkezik, azonnal javíttassa meg, mert ezzel elkerülheti a további meghibásodást.

A megfelelő eszközt minden esetben a rendelő szakorvos határozza meg és javaslata alapján alkalmazható.

Az eszköz felvétele során hangsúlyozottan ajánljuk a korrekt felhelyezést és a beállítást, mivel akkor érhetjük el a kívánt funkciót.

Amennyiben az eszköz nem megfelelően lett kiválasztva, esetenként negatív hatást válthat ki, vérkeringési, vagy más kellemetlen problémákat okozhat.

Amennyiben bármilyen problémát tapasztal (pl. alapanyag sérülése, funkció csökkenés), azonnal hagyja abba az eszköz használatát, és vegye fel a kapcsolatot, az eszközt rendelő orvossal, és/vagy az eszközt kiszolgáló céggel.

Amennyiben nem használja az eszközt tiszta, száraz helyen tárolja.

TILOS!

Az orvos által meghatározott beállításokat megváltoztatni.

Az eszközt más személy részére használatra átadni, mivel az Ön méreteire lett készítve.

3. Anyag

Az ortézisben felhasznált anyagok bevizsgálásra kerültek, és viselésre alkalmasnak minősítették. Az eszköz elkészítésekor magas műszaki és minőségi követelményeket állítottunk, amelyek biztosítják a megfelelő minőséget. Az eszköz kialakítása megfelel a vele szemben támasztott követelményeknek.

4. Tisztítás

Bőr felsőrészű cipőit hagyományos módon tisztítsa, puha ruhával, kefével, sárkefével. A megtisztított cipőt azonos színű - ennek hiányában színtelen - cipőkrémmel kenje be, majd puha ruhával, vagy kefével tisztítsa. A bőrtalp szennyeződéseit sárkefével távolítsa el, vízzel semmi esetre se mossa le, mert azt magába szívja.

Vasalni, centrifugálni, forró fűtőtesten szárítani tilos!

Csak kézzel tisztítható!

